

ANTI-A (ABO1)

Référence	70501/70540
Désignation	ANTI-A (ABO1)
Clone	9113D10
CE	Produit marqué CE selon la Directive 98/79/EC
Aspect	Liquide bleu transparent
Destination	ANTI-A (ABO1) est utilisé pour le groupage sanguin. Il permet la détermination de l'antigène érythrocytaire A à la surface des globules rouges.
Emballage	5 x 10 ml – 1000 tests (70501) 100 x 10 ml – 20000 tests (70540) Verre neutre transparent Compte-gouttes calibré, bouchon bleu, buse blanche en caoutchouc naturel
Descriptif	Anticorps monoclonal de type IgM, d'origine murine. Le réactif promeut l'agglutination des globules rouges portant l'antigène A. L'absence d'agglutination normalement indique l'absence de l'antigène A.
Technique d'utilisation	1) Technique tube à température ambiante (18-25°C) 2) Technique lame à température ambiante (18-25°C)
Performances	Anti-A réagit avec des globules rouges A1 et A2B. Des résultats négatifs sont observés avec des hématies O et B.
Filtration	Ce produit est filtré avec un filtre de 0.2 µm
Température de stockage	Stocker entre 2-8°C – Ne pas congeler



ANTI-A (ABO1)

Validité maximale	22 mois									
Validité après ouverture	Péremption du lot									
Lecture des résultats	Lecture immédiate									
Test virologique	Le matériel source de ce clone a été testé négatif pour le VIH, HBs Ag and HCV									
Azide de sodium	< 0.1% w/w									
Arsenite de sodium	0.02% w/w									
Titre minimum garanti (+/- un titre par rapport au standard DIAGAST)	<table border="1"><thead><tr><th>Hématies</th><th>A1</th><th>A2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Technique</td><td>Tube</td><td>Tube</td></tr><tr><td>Titre</td><td>256</td><td>256</td></tr></tbody></table>	Hématies	A1	A2	Technique	Tube	Tube	Titre	256	256
Hématies	A1	A2								
Technique	Tube	Tube								
Titre	256	256								
Titre minimum observé* (+/- un titre par rapport au standard DIAGAST) *titre minimum observé sur 10 lots	<table border="1"><thead><tr><th>Hématies</th><th>A1</th><th>A2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Technique</td><td>Tube</td><td>Tube</td></tr><tr><td>Titre</td><td>1024</td><td>512</td></tr></tbody></table>	Hématies	A1	A2	Technique	Tube	Tube	Titre	1024	512
Hématies	A1	A2								
Technique	Tube	Tube								
Titre	1024	512								
Fiche de sécurité	Selon la réglementation REACH, ce produit n'est pas considéré comme dangereux. (pas de pictogramme), ne nécessitant pas de fiche de sécurité.									
Notice disponible sur	www.diagast.com									